

V-Veil UP2 : une solution simple et rapide pour détecter les MST et le HPV chez les femmes

3 février, 2023 | Bien-être & Santé

Jusqu'à maintenant, la détection du cancer du col de l'utérus a été très complexe. Par an, en France, 3000 femmes sont touchées et un tiers en décèdent.

V-Veil-Up Production, fondée par Bernard Chaffringeon, a conçu le Voile Vaginal Collecteur « V-Veil UP2 » : une révolution pour dépister rapidement et efficacement cette maladie. Depuis 2020, un accord mondial a été signé avec un fabricant de machine PCR pour le fournir au plus grand nombre de femmes.

Comment ça marche ?

Le Voile Vaginal Collecteur « V-Veil UP2 » s'insère à l'intérieur du vagin à l'aide d'un applicateur. Il prélève sécrétions et fluides en tous genres contenus dans l'utérus et le col de l'utérus. Il existe en deux tailles différentes : 14mm et 28mm.

La pose ne dure que peu de temps : en effet, en seulement **2 minutes**, le Voile Vaginal Collecteur « V-Veil UP2 » a fait sa collecte.

Une fois retiré, il est mis dans un tube de transport contenant du liquide de conservation (qui permettra de le garder en l'état pendant 83 jours).

Un laboratoire se charge ensuite d'analyser le contenu du tube, qui s'apparente à la procédure d'analyse moléculaire type PCR. Les résultats obtenus feront l'objet d'intervention en fonction de leur gravité.



L'avantage du collecteur à volets : le design spécial de nos volets permet de collecter et de retenir plus de cellules de la région du col de l'utérus.



Un test rapide qui sauve déjà des vies

Comme expliqué précédemment, cette procédure de dépistage se fait très rapidement et sans douleur pour la femme.

Le Voile Vaginal Collecteur « V-Veil UP2 » a d'ores et déjà prouvé son efficacité car sur, 256 femmes, **97.1%** l'ont bien accepté.

De plus, en comparaison à un prélèvement standard par écouvillon réalisé par un gynécologue ou une infirmière, la détection des papillomavirus oncogènes à haut risque (HPV-HR) par PCR multiplex en temps réel a pratiquement doublée grâce son utilisation, et celle des **HPV-HR oncogènes** est douze fois plus efficace.

Aujourd'hui, l'ambition de V-Veil-Up Production est d'utiliser au maximum ce nouveau test, notamment durant les campagnes de prévention mais pas seulement : l'idéal pour l'entreprise serait qu'il soit directement recevable sous forme de kit par la poste pour accélérer le processus de dépistage.

Comparaison de l'efficacité de deux méthodes

ÉCOUVILLON FLOQUÉ

Jusqu'à
200
%

VOILE
V-VEIL
UP2

hpv-veil.com

<https://curiosites-magazine.com/2023/02/03/v-veil-up2-une-solution-simple-et-rapide-pour-detecter-les-mst-et-le-hpv-chez-les-femmes/>