
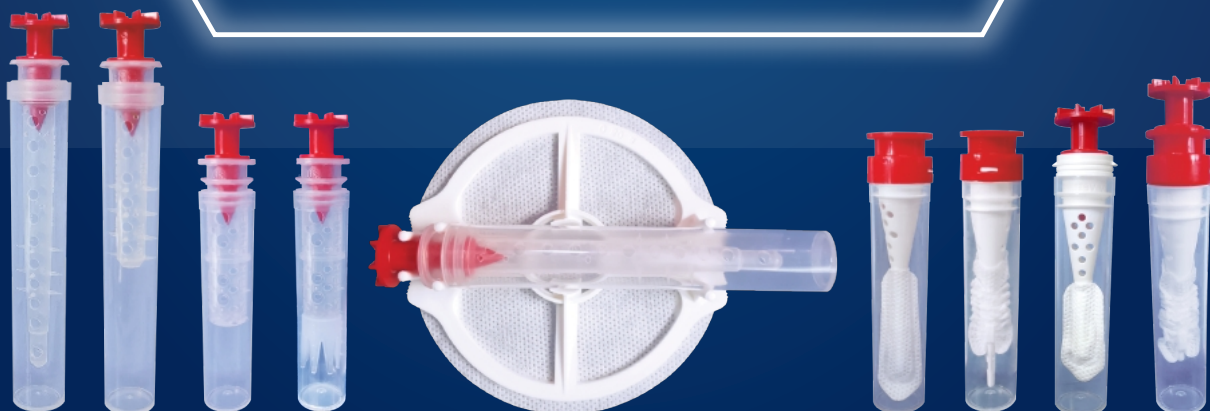


DISPOZITIVE MEDICALE V-VEIL UP²TM

pentru
RECOLTARE ȘI AUTO-RECOLTARE

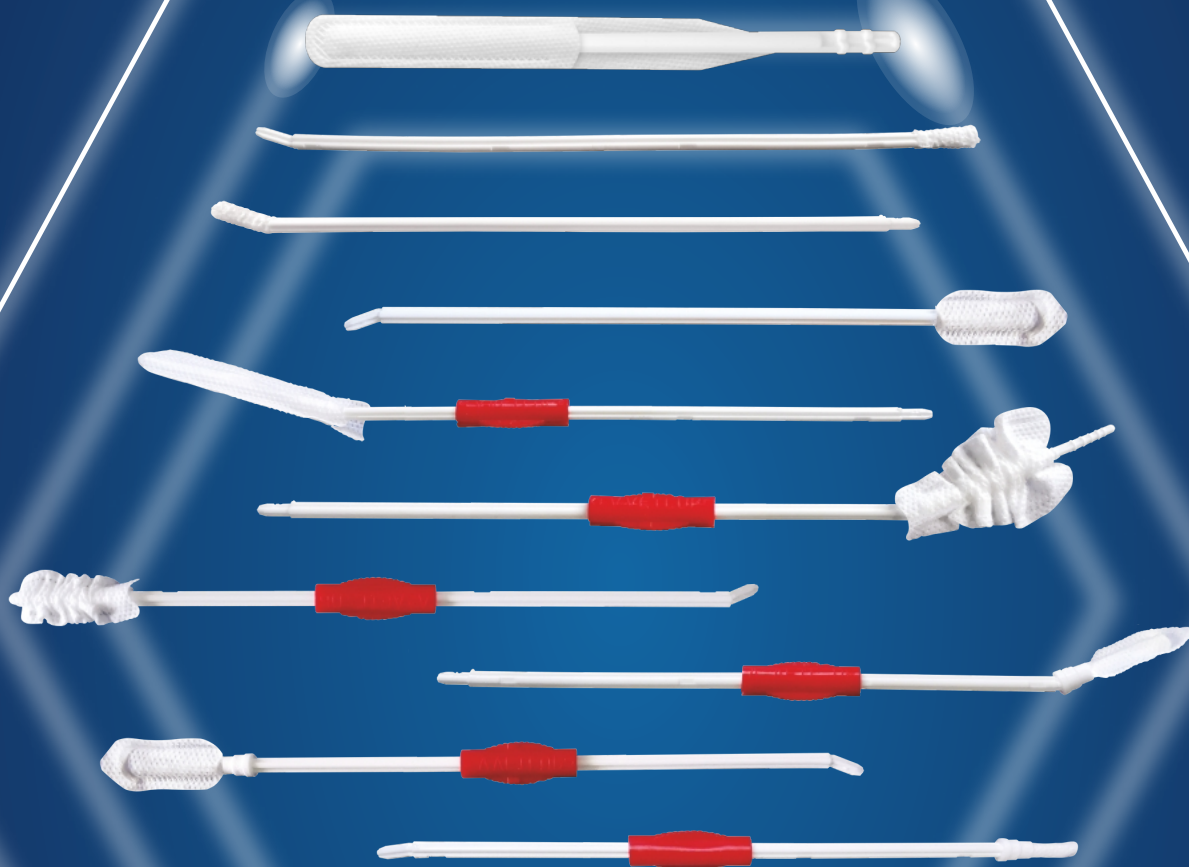

Toate produsele din gamă

Noi oferim soluția, dvs obțineți cele mai bune rezultate

V-Veil-Up Production SRL este o companie europeană de tehnologie medicală, fondată în 2019, cu sediul în România, specializată în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de dispozitive medicale inovatoare, axate în special pe auto-recoltare, prelevare de probe și colectarea de materiale și fluide corporale pentru testare.

Dispozitivele sunt produse într-o unitate certificată ISO8, conform standardelor EN ISO13485:2016, asigurând cel mai înalt nivel de calitate și siguranță, și sunt înregistrate în EUDAMED și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Acoperite de 510 brevete și brevete în așteptare, dispozitivele medicale sunt produse în conformitate cu Regulamentele (UE) 2017/745 (MDR) și 2017/746 (IVDR), principalele cadre juridice care reglementează dispozitivele medicale și de diagnostic in vitro în Uniunea Europeană.

Compania oferă servicii de externalizare OEM (Original Equipment Manufacturing - Fabricație de Echipamente Originale), permițând altor companii sau laboratoare să marcheze produsul sub propriul nume, beneficiind în același timp de tehnologia brevetată și expertiza în fabricație a V-Veil.

Dispozitivele medicale sunt proiectate și fabricate pentru a oferi o platformă de testare multi-aplicativă care acoperă o gamă largă de aplicații, cum ar fi, utilizare:

UMANĂ

- ✓ Cancer de col uterin
- ✓ ITS
- ✓ Tuberculoză
- ✓ Distribuirea de medicamente

INDUSTRIALĂ

- ✓ Siguranța alimentară
- ✓ Industrie

CRIMINALISTICĂ

- ✓ Dispozitiv de recoltare cu tamponul pentru analize criminalistice

IGIENICĂ

- ✓ Igiena auriculară


VETERINARĂ

- ✓ Animal de companie


Dispozitiv medical cu auto-recoltare HPV, ITS, microbiom vaginal, metilare

Dispozitiv pentru auto-recoltare

V-Veil UP2™ este un dispozitiv medical dezinfectat UVC de clasa I, conform MDR UE 2017/745, pentru colectarea de secreții, diverse fluide și substanțe din cavitatea vaginală și colul uterin uman pentru analize de diagnostic în laborator.

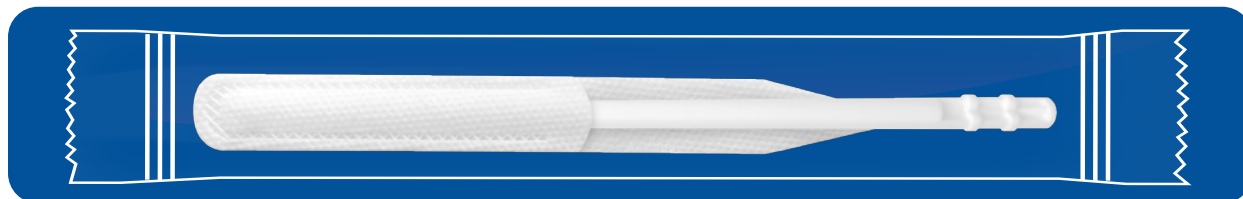

- ✓ auto-recoltare în clinică
- ✓ auto-recoltare la domiciliu

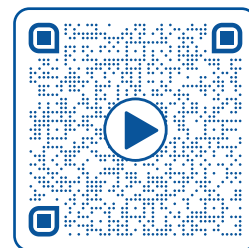

Caracteristici

- produs în cameră curată ISO 8
- dezinfectat UV-C
- ambalat individual în pungă de plastic de calitate medicală
- stabilitate de 30 de zile în mediu uscat la temperatura camerei (4°C până la 40°C) și 7 zile pentru temperaturi extreme (50°C)
- compatibil cu tubul UP2 Retrofitter™
- acceptabilitate ridicată (≥96%), fezabilitate și satisfacție pentru auto-recoltarea genitală cu voal
- precizie ridicată, auto-recoltarea cu voal nu este inferioară colectării de către clinician pentru testarea moleculară a ADN-ului HR-HPV
- ≈ 2rate de detectare de 2 ori a ADN-ului HPV cervical prin auto-recoltare cu voal
- eliberează mai mult de 90.7% ADN și 81,3% proteine
- randament de colectare mai mare bazat pe tehnologia brevetată a voalului
- reducerea variabilității recoltării
- performanță de recoltare stabilă și omogenă
- reproductibilitate îmbunătățită
- rate ridicate de recuperare pentru Candida albicans

ANALIZE POSIBILE cu V-VEIL UP2™

Genotipare HPV

- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Ureaplasma parvum

Microbiom vaginal

- Ureaplasma urealyticum
- Mycoplasma Genitalium
- Mycoplasma hominis

Metilare

- Trichomonas vaginalis
- Gardnerella vaginalis
- Herpes Simplex virus 1

Infecții cu transmitere sexuală:


- Herpes Simplex virus 2
- Syphilis (Treponema pallidum)

Materiale

Polietilenă/Poliester-bico; Polipropilenă-Homopolimer pentru uz medical și farmaceutic

Nu este fabricat cu latex de cauciuc natural

MOD DE UTILIZARE

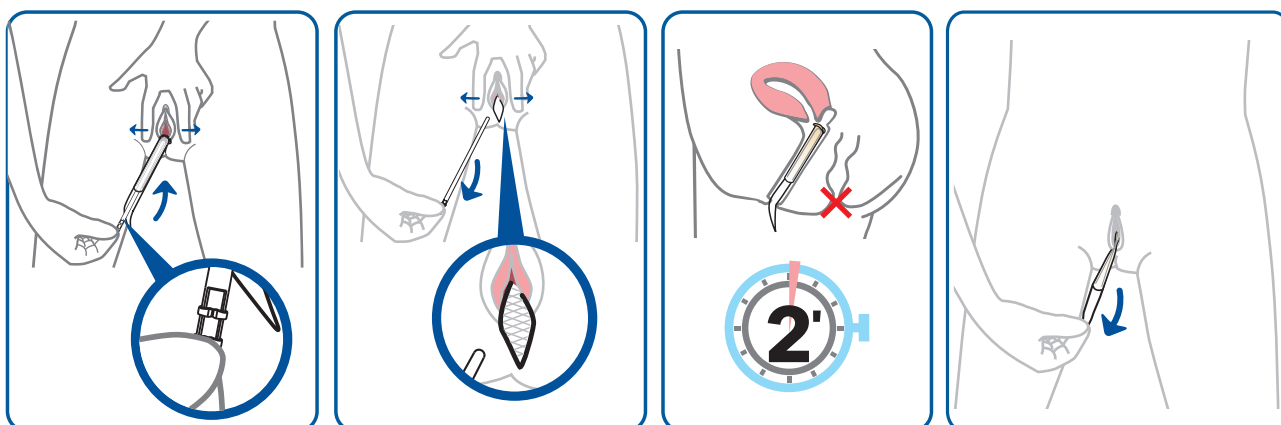

TESTELE EFECTUATE CU PRIVIRE LA V-Veil UP2™:

- Citotoxicitate
- Sensibilitate
- Iritație vaginală (timp de 5 zile consecutiv)


Produsele noastre sunt disponibile în:

- ambalaj individual;
- ambalaj colectiv 100 și 250 buc.;
- vrac 1000 buc.

	Cod Comandă	Cant.	Ambalaj	Cant. min.
	1001	1 buc	Cutie/Ambalaj hârtie	180/300 buc
	9004	100 buc	Cutie colectivă	600 buc
	9003	250 buc	Cutie colectivă	1000 buc
	9001	1000 buc	Cutie de transport	1000 buc

Dispozitiv medical *in vitro* colectare, depozitare, conservare, transport

Tubul UP2 Retrofitter™ este un recipient utilizat pentru colectarea, depozitarea, conservarea, transportul și efectuarea analizelor de laborator pentru diagnostic *in vitro* ale specimenelor.

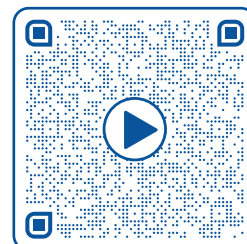

Caracteristici

- **produs în cameră curată ISO 8**
- **dezinfectat cu UV-C**
- **ambalat individual** în pungă de plastic de calitate medicală
- **compatibilitate** cu toate suporturile pentru eprubete cu diametrul de 14-16 mm pentru PCR
- **mai rapid** - utilizare profesională sau de către pacient pentru colectarea, depozitarea și transportul secrețiilor, diverselor fluide și substanțe din nas, urechi, cavitatea bucală, vagin, col uterin și anus pentru examinări ulterioare
- **mai sigur** - odată închisă, proba colectată nu mai poate fi atinsă, acest lucru menținând integritatea probei. Proba este protejată între pereții UP2 Retrofitter™ și tubul exterior
- **eficiență** - permite laboratoarelor să o utilizeze direct cu robotul preanalitic, fără tub intermediar și cod de bare
- **flexibilitate** - în laborator se pot utiliza diverse medii de eluție compatibile cu PCR, fără interferențe de reacție


Tubul primar de ultimă generație, cu **UP2 Retrofitter™**, permite laboratoarelor să utilizeze tubul primar, care conține dispozitivul auto-colectat, direct cu un robot preanalitic, fără a fi nevoie de un tub intermediar și un cod de bare.

Tehnologia brevetată **V-Veil UP2™** cu **UP2 Retrofitter™** este potrivită pentru toate clinicile și spitalele.

AVANTAJE LABORATOR

- ✓ Mai sigur
- ✓ Mai rapid
- ✓ Fără contaminare
- ✓ Economic
- ✓ Gata pentru extracție


Dimensiune compatibilă
cu cutiile de depozitare frigorifice

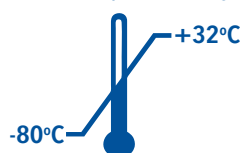

MOD DE UTILIZARE

PAȘI PENTRU PACIENTĂ _____

1. Introduceți voalul cu specimenul prelevat în interiorul tubului;
2. Introduceți **UP2 Retrofitter™** în tub, peste voalul vaginal colector.
3. Închideți prin apăsare capacul **UP2 Retrofitter™** până ce se aude de 3 ori "click", păstrând specimenul prelevat între pereții Retrofitter-ului și ai tubului.

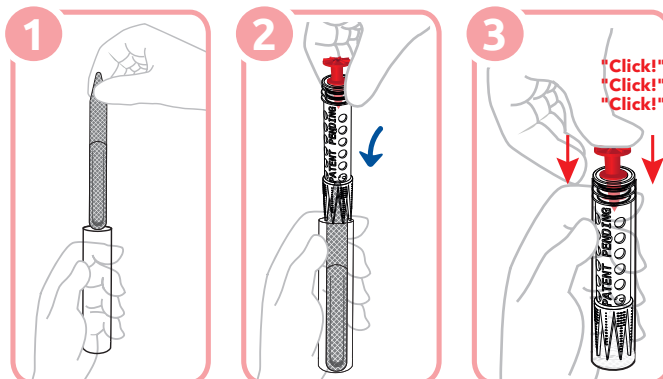


PAȘI PENTRU LABORATOR _____

Odată ce laboratorul primește tubul **UP2 Retrofitter™**, împreună cu proba colectată, tehnicianul de laborator efectuează următorii pași:


1. Îndepărtați capacul roșu.
2. Adăugați 5 ml din oricare dintre mediile de eluție compatibile cu PCR, fără interferențe de reacție, care pot fi:
 - ✓ Mediu de colectare apos, tamponat, fără interferențe de reacție
 - ✓ Soluție tampon Tris-EDTA (TE) (1X) pH 8.0 pentru biologie moleculară
 - ✓ Soluție salină tamponată cu fosfat („PBS”)
 - ✓ Soluție salină fiziologică
 - ✓ Mediu de transport universal
 - ✓ Mediu de transport viral
 - ✓ Mediu citologic obișnuit pentru HPV, cum ar fi mediul de colectare pe bază de metanol sau etanol
3. Efectuați mișcări de rotație a tubului, pentru a amesteca lichidul.
4. Vortexați tubul timp de 1 minut.
5. Introduceți tubul direct în automat, pentru pasul următor, care necesită utilizarea pipetei.
6. După finalizare, puneți capacul verde (tubul cu capac de hemoliză de dimensiuni standard pentru a marca faptul că proba a fost testată).



Consultați
instrucțiunile
de utilizare

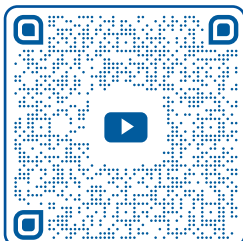

Tub UP2 Retrofitter™

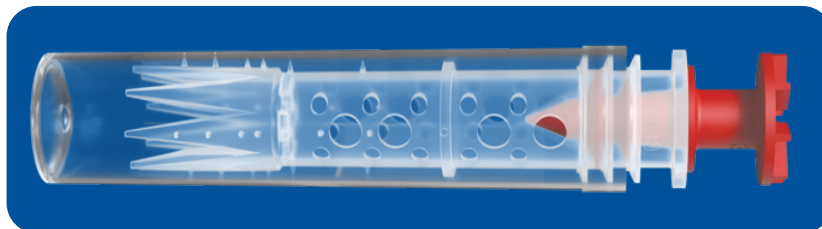

Produsele noastre sunt disponibile în:

- ambalaj individual;
- ambalaj colectiv 100 buc.;
- vrac 500 buc.

	Dimensiune	Cod comandă	Cant.	Ambalaj	Cant. min.
	17x81 mm	8901	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x81 mm	8902	500 buc	Cutie de transport	500 buc
<i>Folie de aluminiu perforabilă</i> 	17x82 mm	8915	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x82 mm	8916	500 buc	Cutie de transport	500 buc
	17x81 mm	8917	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x81 mm	8918	500 buc	Cutie de transport	500 buc
	17x107 mm	8907	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x107 mm	8908	500 buc	Cutie de transport	500 buc
	17x107 mm	8911	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x107 mm	8912	500 buc	Cutie de transport	500 buc
	17x107 mm	8921	100 buc	Cutie colectivă	400 buc
	17x107 mm	8922	500 buc	Cutie de transport	500 buc

Materiale

Polipropilenă (PP); Polietilenă de joasă densitate (LDPE); Polietilenă/Poliester-bico

Nu este fabricat cu latex de cauciuc natural

Pentru comenzi, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la contact@vvup.org

Pachet de proceduri pentru auto-eșantionare HPV, ITS, Microbiom vaginal, Metilare

Dispozitiv pentru auto-recoltare

V-Veil UP2™ KIT 1.3 este un kit de auto-eșantionare utilizat pentru colectarea de secreții, diverse fluide și substanțe care se află în cavitatea vaginală și în colul uterin, pentru diagnosticare utilizând teste de laborator.




- ✓ auto-recoltare în clinică
- ✓ auto-recoltare la domiciliu



Conținut

- 1 buc. V-Veil UP2™ ambalat individual
- 1 buc. Tub cu UP2 Retrofitter™ ambalat individual
- 1 buc. Instrucțiuni de utilizare, împachetate într-un ambalaj ecologic

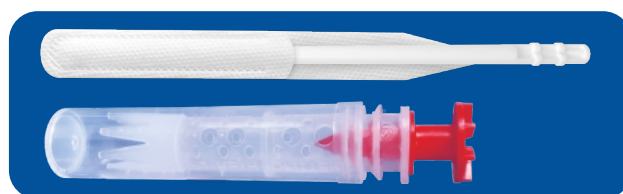

Caracteristici




- **produs în cameră curată ISO 8**
- **dezinfectat UV-C**
- **randament de colectare mai mare** și **eliberare a unei cantități mai mari** de 90,7% ADN și 81,3% proteine
- **acceptabilitate ridicată (≥96%)**, fezabilitate și satisfacție pentru autocolectarea genitală prin voal
- **precizie ridicată**, autocolectarea prin voal nu este inferioară colectării efectuate de clinician pentru testarea moleculară a ADN-ului HR-HPV
- **≈ rate de detectare de 2 ori a ADN-ului HPV cervical** prin auto-eșantionare cu voal
- **stabilitate de 30 de zile** în mediu uscat la temperatura camerei (4°C până la 40°C)
- **compatibilitate** cu toate suporturile de eprubete cu diametrul de 14-16 mm pentru PCR
- **mai sigur** - odată închisă, proba colectată nu mai poate fi atinsă, acest lucru menținând integritatea probei. Proba este protejată între pereții UP2 Retrofitter™ și tubul exterior.
- **eficiență** - permite laboratoarelor să o utilizeze direct cu robotul preanalitic, fără un tub intermediar și cod de bare

Cod comandă	Cant.	Ambalaj	Cant. min.
1004	1 buc	Ambalaj de hârtie	300 buc
9002	50 buc	Cutie colectivă	200 buc

MOD DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ETAPA 1

1. Spălați-vă pe mâini și ștergeți-le cu un prosop curat.
2. Deschideți pachetul și scoateți **V-Veil UP2™** din ambalajul său, desfăcându-l în partea special prevăzută în acest sens. Păstrați pachetul și aruncați ambalajul desfăcut împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
3. Prindeți cu degetele aplicatorul de partea terminală (în zona de prindere). Relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă: șezând cu picioarele depărtate, în picioare cu un picior ridicat sau în picioare cu picioarele ușor flexate. Depărtați labiile exterioare și apropiați partea superioară a **V-Veil UP2™** de vagin. Introduceți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului. Continuați să împingeți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului până ce zona de prindere rămâne în afara vaginului. Partea terminală în formă de "V" trebuie să atârne liber în exteriorul vaginului.
4. Pentru a scoate aplicatorul, trageți-l ușor afară, având grijă să nu trageți și voalul. Aruncați aplicatorul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. **ATENȚIE!** În funcție de dimensiunea vaginului și de modul în care ați introdus voalul intravaginal, este obligatoriu ca extremitatea în formă de "V" să rămână vizibilă, astfel încât să poată fi îndepărtat după utilizare.
5. Așteptați cu voalul introdus în cavitatea vaginală 2 minute.

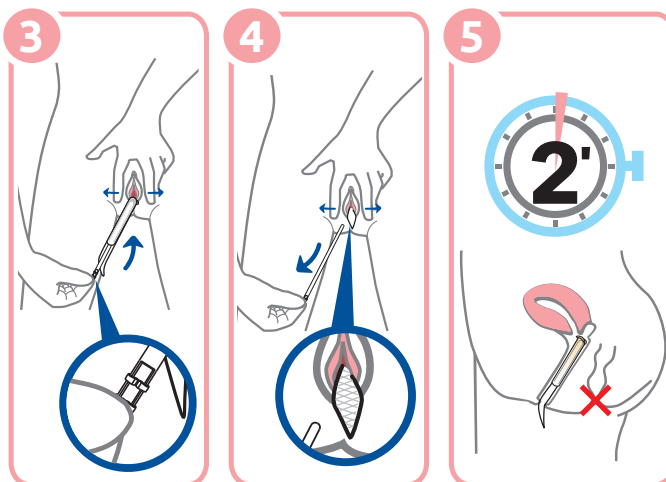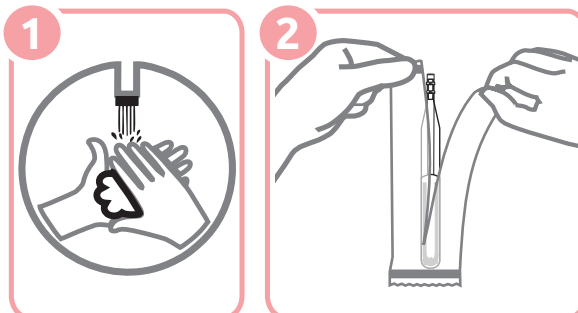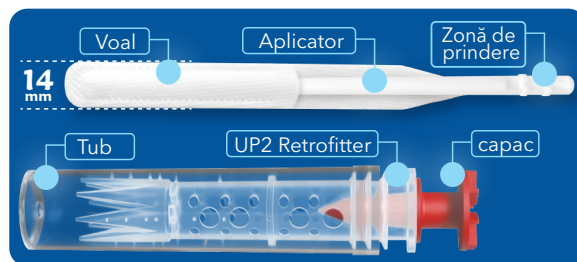

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ETAPA 2

6. Pentru a scoate V-Veil UP2™ spălați-vă pe mâini și ștergeți-le cu un prosop curat. Deschideți **UP2 Retrofitter™** al tubului și țineți-l în mână. Așezați tubul pe o suprafață plană și curată.
7. Relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă din cele prezentate mai sus. Voalul se îndepărtează ușor trăgând de partea terminală în formă de "V".
8. Introduceți voalul cu specimenul prelevat în interiorul tubului.
9. Închideți prin apăsare capacul **UP2 Retrofitter™** până ce se aude de 3 ori "click", păstrând specimenul prelevat între pereții Retrofitter-ului și ai tubului.
10. Puneți recipientul cu proba colectată într-un loc curat și uscat, ferit de lumina soarelui. Urmați pașii recomandați de medicul dumneavoastră, farmacistul sau profesionistul care v-a recomandat auto-recoltarea.

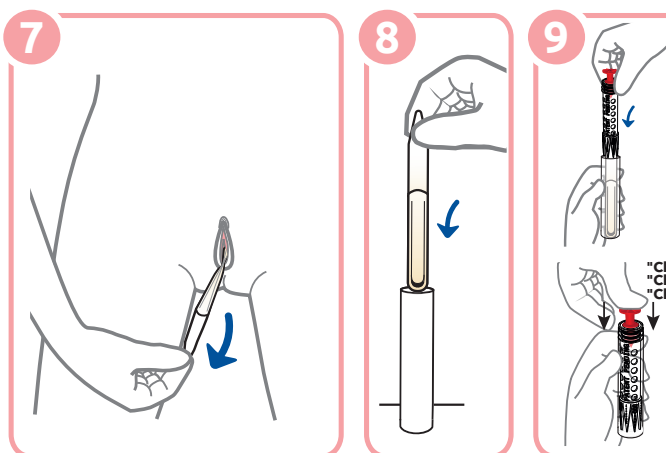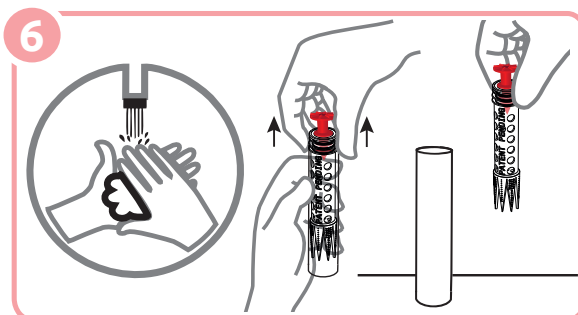

Pachet de proceduri pentru auto-recoltare HPV, ITS, Microbiom vaginal, Metilare

Colectare cu auto-recoltare

V-Veil UP2™ KIT 4.3 este un kit de auto-recoltare utilizat pentru colectarea de secreții, diverse fluide și substanțe care se află în cavitatea vaginală și în colul uterin, pentru diagnosticare utilizând teste de laborator.




- ✓ auto-recoltare în clinică
- ✓ auto-recoltare la domiciliu



Conținut

- 1 buc. V-Veil UP2™ ambalat individual
- 1 buc. Tub cu UP2 Retrofitter™ ambalat individual
- 1 buc. pungă de siguranță
- 1 buc. instrucțiuni de utilizare,
- împachetate într-un ambalaj ecologic

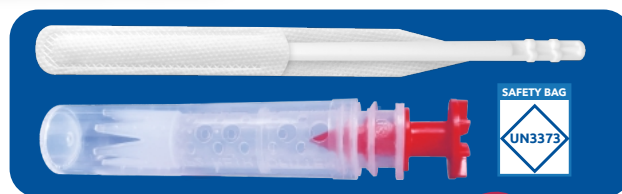

respectă regulile pentru
livrarea substanțelor
biologice categoria B
(UN3373)

Caracteristici

- produs în cameră curată ISO 8
- dezinfectat UV-C
- randament de colectare mai mare și eliberare a unei cantități mai mari de 90,7% ADN și 81,3% proteine
- acceptabilitate ridicată (≥96%), fezabilitate și satisfacție pentru autocolectarea genitală prin voal
- precizie ridicată, autocolectarea prin voal nu este inferioară colectării efectuate de clinician pentru testarea moleculară a ADN-ului HR-HPV
- ≈ rate de detectare de 2 ori a ADN-ului HPV cervical prin auto-eșantionare cu voal
- stabilitate de 30 de zile în mediu uscat la temperatura camerei (4°C până la 40°C)
- compatibilitate cu toate suporturile de eprubete cu diametrul de 14-16 mm pentru PCR
- mai sigur - odată închisă, proba colectată nu mai poate fi atinsă, acest lucru menținând integritatea probei. Proba este protejată între pereții UP2 Retrofitter™ și tubul exterior.
- eficiență - permite laboratoarelor să o utilizeze direct cu robotul preanalitic, fără un tub intermediar și cod de bare

Cod comandă	Cant.	Ambalaj	Cant. min.
1011	1 buc	Cutie	120 buc

Avantajele soluției de auto-recoltare V-VEIL UP2™ și Tub UP2 Retrofitter™



Tehnologie brevetată pentru HPV & ITS

- 1** Tehnologia **V-Veil UP2™** brevetată eliberează toate moleculele biochimice (90,7% ADN și 81,3% proteine) conținute în secreția genitală a unei femei. **V-Veil UP2™** este cu până la 20% mai eficient decât tamponul.

Eliberarea mai bună a secreției genitale duce la salvarea mai multor vieți!


- 2** **Un studiu clinic de cercetare pe teren* cu 253 de participante**, efectuat de Spitalul European Georges Pompidou (Paris) - demonstrează că recoltarea secrețiilor genitale feminine folosind **V-Veil UP2™**, dispozitiv de auto-prelevare oferit de V-Veil-UP Production SRL, **detectează de până la 2 ori mai multe HPV decât tamponul flocat.**

*Studiu publicat în reviste științifice și la congrese medicale, disponibil pe site-ul hvp-veil.com

**Performanțe de detecție îmbunătățite pentru HPV oncogene:
detectând mai mult, salvăm mai multe vieți!**

- 3** **V-Veil UP2™** este listat ca dispozitiv medical pentru auto-recoltare în raportul privind peisajul tehnologic al Unitaid: **Depistarea leziunilor precanceroase pentru prevenirea secundară a cancerului de col uterin.**

Raportul UNITAID

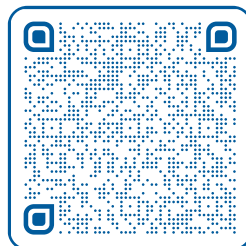

- 4** **Tubul brevetat cu UP2 Retrofitter™, dispozitiv de nouă generație**, care conține dispozitivul de auto-prelevare **V-Veil UP2™**, permite laboratoarelor să utilizeze tubul primar, direct cu un robot preanalitic, fără a fi nevoie de un tub intermediar și de un cod de bare. Utilizarea directă a tubului primar este optimă pentru testarea moleculară HPV și ITS.

**Permite încărcarea directă pe analizoare automate.
Mai rapid și mai economic! Reduce riscul de eroare preanalitică.**

- 5** Dispozitivul de auto-prelevare **V-Veil UP2™** nu utilizează lichid de transport** și poate fi depozitat 30 de zile la temperatura camerei, între 4 și 40°C (7 zile la temperaturi extreme de 50°C). Dispozitivele răspund nevoilor campaniilor naționale de screening HPV sau ITS.

**Nu este recomandat ca pacienta să utilizeze tubul de colectare cu lichid de transport fără supravegherea unui profesionist.


În conformitate cu reglementările pentru campaniile de testare HPV și ITS.

**Neutralitate cu privire la reactivii de biologie moleculară utilizați.
Compatibilitate cu toate kiturile PCR HPV de pe piață.**

în populație generală
feminină formată din **253 participante**

Un studiu prospectiv randomizat de non-inferioritate




Detalii
studiu

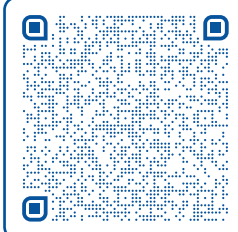

Acest studiu a fost efectuat pe 253 de femei adulte de către echipa de cercetare a **Laboratorului de Virusologie al Spitalului European Georges Pompidou din Franța**. Voalul detectează de 2 ori mai mult HPV oncogenic decât metoda cu tampon standard aplicată de un ginecolog.

Graficul de mai jos compară detectarea moleculară a genotipurilor HPV efectuate din:

- Secreții genitale auto-prelevate de femei, folosind V-Veil UP2™
- Secreții genitale colectate de un ginecolog sau de o asistentă medicală, cu ajutorul unui tampon standard

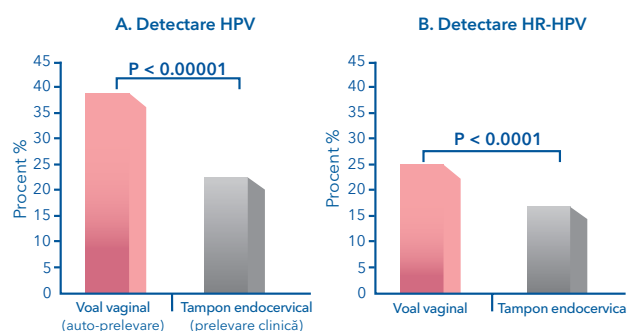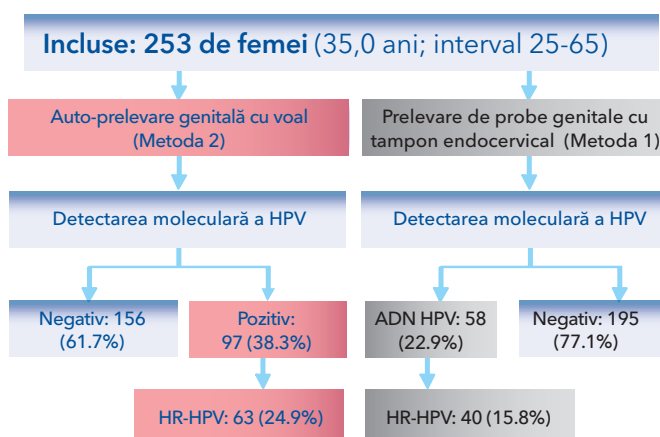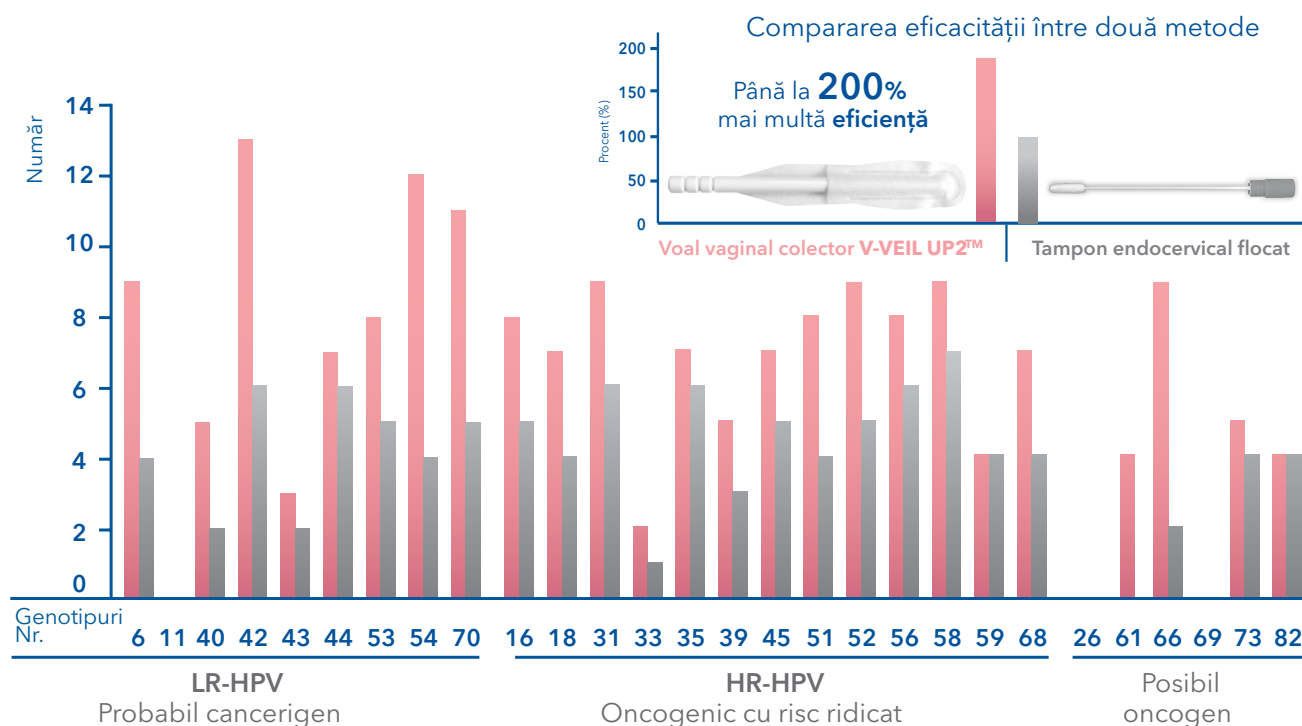

Rate de detecție ≈ 2 ori mai mari ale ADN-ului HPV de col uterin și a ADN-ului HPV cu risc ridicat (HR) prin auto-prelevare cu voal

Compararea eficacității între V-VEIL UP2™ și tamponul endocervical



REZULTATE:

Din totalul de 253 de femei participante la studiu, 90 au fost descoperite pozitive pentru HR-HPV utilizând metoda de auto-recoltare cu V-Veil UP2™, în timp ce doar 60 au fost descoperite pozitive pentru HR-HPV utilizând tamponul flocat. Utilizând metoda de auto-recoltare cu V-Veil UP2™ s-a detectat cu 50% mai mult HR-HPV. (Detalii disponibile în studiu)

Acceptabilitate ridicată (≥96%), fezabilitate și satisfacție pentru auto-prelevarea genitală cu ajutorul voalului.

Precizie ridicată:

- ✓ Concordanță bună între auto-prelevarea pe bază de voal și prelevarea de referință pe bază de tampon;
- ✓ Auto-prelevarea cu voal a fost non-inferioară prelevării de către medic pentru testarea moleculară HR-HPV ADN ($P < 0,01$);
- ✓ Sensibilitate ridicată (95.0%; 95%CI: 88.3-100.0%);
- ✓ Specificitate ridicată (88.2%; 95%CI: 83.9-92.6%).




STUDIU privind absorbția și eliberarea diferențială a componentelor secrețiilor genitale feminine și a ADN-ului HPV

Acest studiu a fost realizat la Spitalul European Georges Pompidou din Paris, Franța și a fost publicat la Eurogin 2025, în Porto, de către profesorul Laurent BELEC. Acest studiu a comparat performanța de absorbție și eliberare in vitro a dispozitivelor de auto-eșantionare utilizate în mod obișnuit pentru proteine totale, acizi nucleici și ADN epizomal al papilomavirusului uman tip 16 (HPV-16). Fiecare produs a primit 100% ADN și proteine, separat, iar scopul a fost cuantificarea ADN-ului sau a proteinei eliberate în tub. Eliberarea de acizi nucleici totali și proteine totale a fost maximală pentru voal, urmat de tamponul flocat, materialul nețesut și tamponul vaginal.

V-Veil UP2™ are o eficiență mai bună decât tamponul flocat:

- ✓ Eliberează 90,7% ADN, cu 20,4% mai mult decât tamponul flocat
- ✓ Eliberează 81,3% proteine, cu 14,5% mai mult decât tamponul flocat

Detalii
studiu

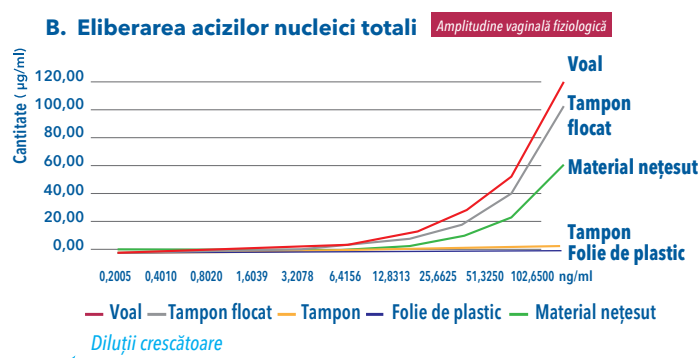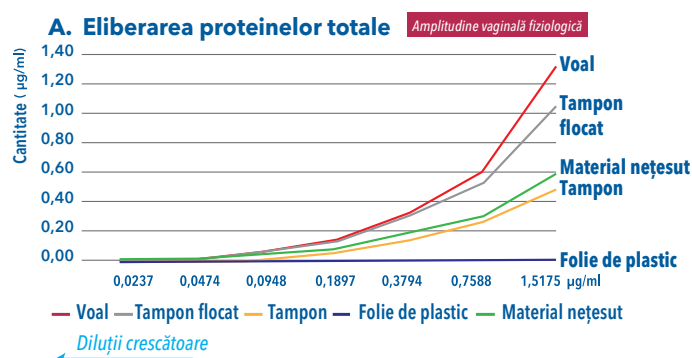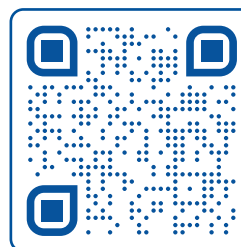


Pentru comenzi, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la contact@vvup.org

Studiu V-VEIL UP2™ ITS și micoplasme genitale

prin Multiplex Real-Time PCR, folosind voalul de auto-prelevare,
în rândul femeilor adulte din Africa Subsahariană

Studiul transversal a fost efectuat pentru a evalua performanța **V-Veil UP2™** ca dispozitiv de auto-prelevare genitală, pentru colectarea secrețiilor genitale în vederea diagnosticării ITS prin biologie moleculară, comparativ cu eșantioanele genitale de referință recoltate de clinicieni, la femeile africane adulte.

Detalii
studiu

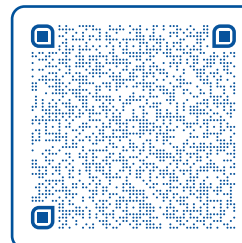

Participante cu consimțământ informat semnat și care îndeplinesc criteriile de includere [n≥248]

Metoda 1:
Prelevare de probe genitale
clinice cu **tampon de col uterin**



Metoda 2:
Auto-prelevare genitală
cu **voal colector**

Transportul probelor la rece (lanț frigorific)

Detectarea moleculară a ITS genitale și a micoplasmelor

Grup I:
Bacterii cu transmitere sexuală vindecabile

Grup II:
Mycoplasma spp. comensală

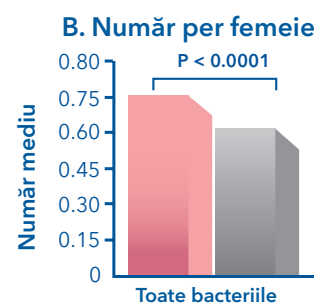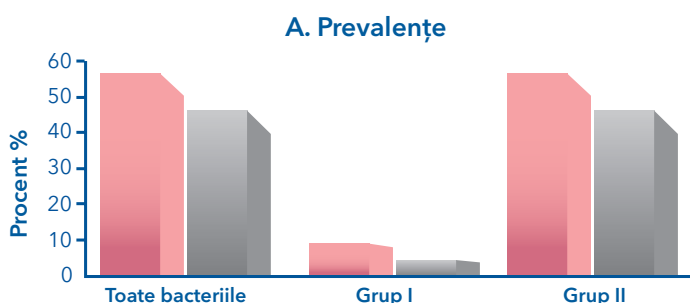

Rezultatele au arătat o **acuratețe ridicată a auto-prelevării genitale pe bază de voal**, care nu a fost inferioară colectării pe bază clinică ca referință pentru testarea moleculară a ADN-ului bacteriilor genitale, cu un acord „aproape perfect” între cele două metode de colectare, sensibilitate și specificitate ridicate.

În mod remarcabil, **numărul mediu de bacterii genitale detectate a fost semnificativ mai mare atunci când s-au utilizat secreții genitale colectate pe bază de voal decât secreții de col uterin colectate de personalul medical cu tampon.**


Auto-prelevarea secrețiilor genitale cu ajutorul dispozitivului **V-Veil UP2™** este un instrument **simplu și puternic de colectare a secrețiilor genitale** pentru teste moleculare ulterioare și pentru depistarea microorganismelor genitale și ar putea fi implementat cu ușurință în programele naționale de prevenire.

Auto-prelevarea cu voal este echivalentă cu tamponul flocat pentru detectarea moleculară a infecțiilor bacteriene cu transmitere sexuală și a bacteriilor genitale.

Studiu V-VEIL UP2™ cu 415 lucrătoare sexuale



Un studiu randomizat, deschis, de non-inferioritate în rândul unei populații cu risc ridicat pentru HIV și HPV

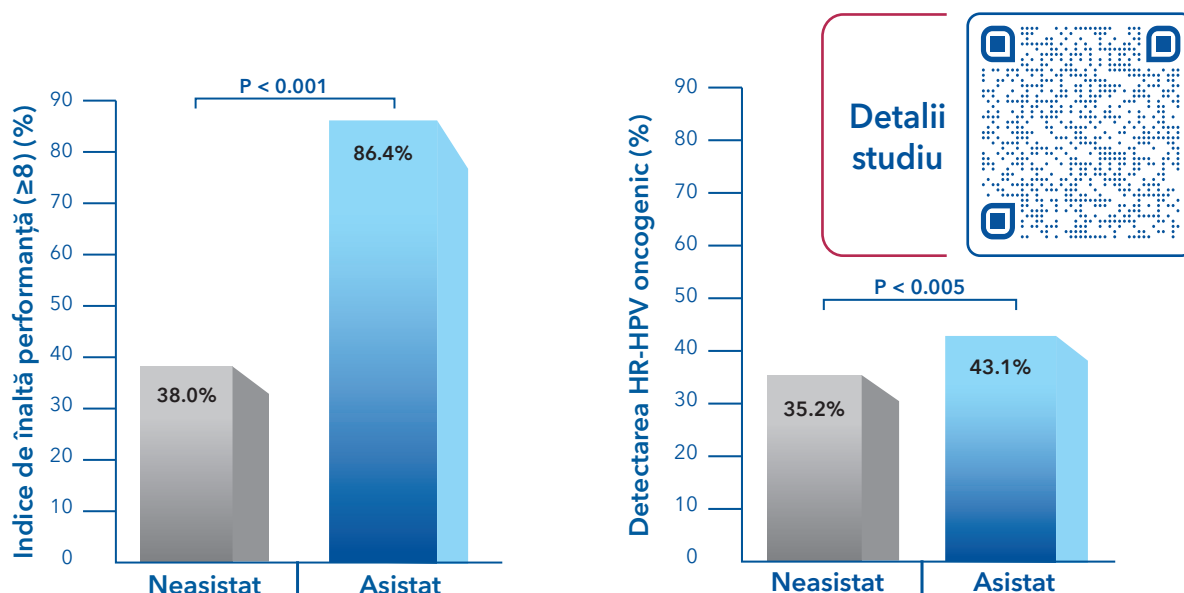

Dimensiunea eșantionului: 415 FSW (vârsta medie 28,1 ani)

Intervenție: Auto-prelevare cu voal neasistată versus auto-prelevare cu voal asistată direct.

Rezultat principal: Realizarea auto-prelevării pe bază de voal folosind indicele de performanță cantitativă (PI; 0 la 10; ridicat ≥ 8; scăzut ≤ 4; moderat: 5-7).

Prevalența infecțiilor cu HPV și HR-HPV la momentul inițial:

- ✓ 54% și, respectiv, 29%, în principal HPV-52 (14%), HPV-66 (10%), HPV-58 (9%);
- ✓ Doar două treimi din HR-HPV ar fi acoperite de vaccinul Gardasil-9®.


Studiu de intervenție:

- ✓ **Acceptabilitate (≥99%)** și satisfacție ridicate pentru auto-prelevarea genitală cu voal, la linia de bază;
- ✓ **Indicele de performanță (linia de bază):** Variabila „nivel de educație” asociată cu performanță scăzută [aOR: 2,6, P<0,005];
- ✓ **Indicele de performanță (după intervenție):**
 - Mai mare în grupurile asistate direct decât în cele neasistate;
 - [PI ridicat în 86,4% din grupul de intervenție față de 38,0% din grupul neasistat; aOR 3,6, P<0,001];
 - Variabila „nivel de educație” nu a fost asociată mai mult cu PI scăzut [aOR: 1,2, NS];
 - Variabila „cunoștințe privind auto-prelevarea genitală” asociată cu un PI ridicat [aOR: 2,9, P<0,001];
 - Auto-prelevarea cu voal asistată direct a permis creșterea performanței de detectare moleculară a HR-HPV în secrețiile genitale auto-prelevate de 1,3 ori.



Salvați mai multe vieți utilizând **V-VEIL UP 2™**

Pentru comenzi, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la
contact@vvup.org

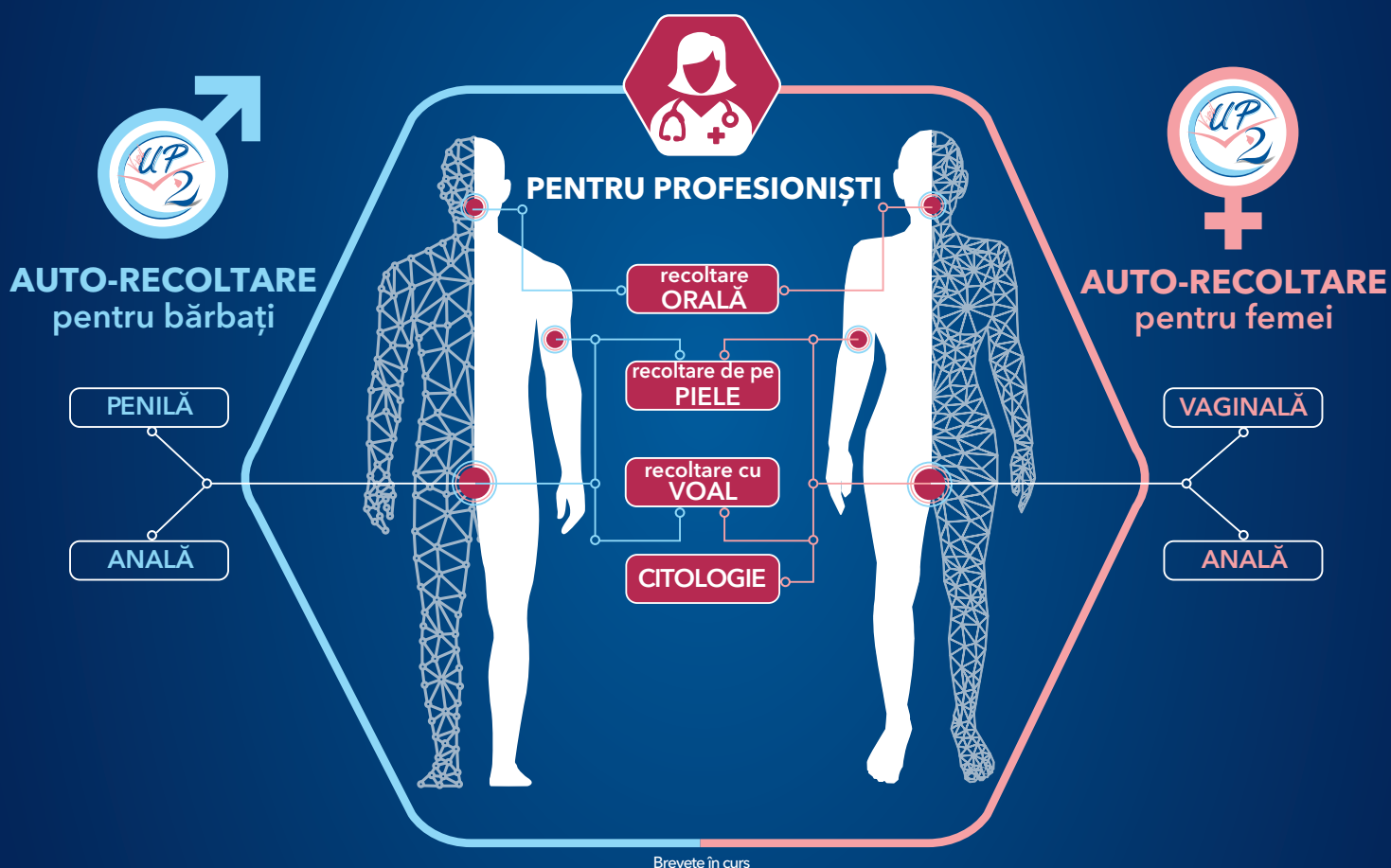

Pentru uz personal, comandați la **test-hpv.shop** (doar pentru UE)



hpv-veil.com

V-VEIL-UP PRODUCTION

Ciocanesti 280B, Calinesti, 117197, Arges
ROMANIA

+40 738 886 499

+40 730 108 555

contact@vvup.org



v-veil-up-production.com